


حقن دواء السُّكَّرِي الخاص بك

اتبع هذه التوصيات لحقن مريح وفعال. #٤١

الخطوة ١: اخلط دوائك (مُستعلق الأنسولين المُتجانس ومزيج الأنسولين)^٨

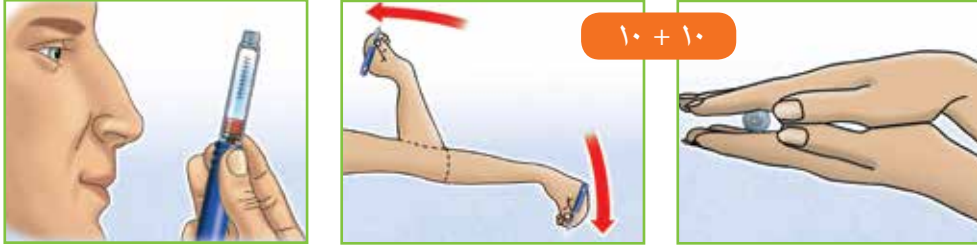

تحقق بنظرك إذا كان هناك أي بلورات متبقية في الجزء السفلي من الخرطوشة.

حرّك القلم بين راحتي يديك واقبله بلطف ٢٠ مرّة على الأقل.

الخطوة ٢. ركب إبرة جديدة لقلمك*



قم بإزالة الغطاء الخارجي وإزالة الغطاء الملون الداخلي.

دائماً ثبت الإبرة على التوالي.

الخطوة ٣. املا القلم وحدد مقداراً لجرعتك*



قبل كل حقن، حدّد مقداراً لا يقل عن وحدتين واملأ القلم مع الحفاظ على وضع الإبرة لأعلى. كرّر هذه الخطوة حتى تظهر قطرة من الدواء على طرف الإبرة لضمان أن القلم يعمل بشكل صحيح وخالي من فقاعات الهواء. ثم حدّد مقدار جرعتك المطلوبة.

^٨ اتبع دائماً إرشادات الاستخدام التي توفرها الشركة المصنعة لدواء السكري الخاص بك.
* هذه توصيات عامة.

حقن دواء السُّكَّرِي الخاص بك

الخطوة ٥: تخلص من إبرة القلم الخاصة بك



بعد كل حقن، يجب إزالة الإبرة والتخلص منها في حاوية الأدوات الحادة.

١ حقن = ١ إبرة قلم جديدة

الخطوة ٤: أدخل الإبرة واحقن الجرعة وانتظر



لضمان إعطاء الجرعة كاملة، من المهم الاحتفاظ بالإبرة تحت الجلد لمدة ١٠ ثوانٍ على الأقل.

أدخل الإبرة في منطقة الحقن وادفع المكبس حتى الصفرة لإعطاء الجرعة.

٨تبع دائما إرشادات الاستخدام التي توفرها الشركة المصنعة لدواء السكري الخاص بك. هذه توصيات عامة.

تحدث مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك حول طول الإبرة المناسب لك:

طول الإبرة الموصى به

إبرة القلم BD Ultra-Fine™
٤ مم x ٣٢ غ (٠,٢٣ مم)

رمز المنتج في المخطط الوطني لخدمات السكري: ١٠١



BD Micro-Fine™ + إبرة قلم
٥ مم x ٣١ غ (٠,٢٥ مم)

رمز المنتج في المخطط الوطني لخدمات السكري: ٩٧



إبرة القلم هي بالحجم الفعلي



إبر قلم ال BD Ultra-Fine ذات ال ٤ مم بتكنولوجيا EasyFlow™

- سن الإبرة ذات ال ٥-جلفات تضمن عملية حقن أكثر لطفا وراحة^{#٢}
- جهد ووقت أقل للحقن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في قوة اليد^{#٣}
- إبرة قلم BD الأصغر والأرفع مناسبة لمعظم الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري^{#١}

٩ بالمقارنة مع إبر قلم الجدار الرقيق BD القياسية.
بالمقارنة مع إبر قلم BD ذات ال ٣ جلفات القياسية.

المراجع:

١. فريد إي إتش، كروغل جي، غراسي جي وأخرون، محضر مايو كلينيك، سبتمبر ٢٠١٥-١٢٣١-١٢٣١(٩):٢٠١٦-٢٠١٦. هيرش إله غيبيني إم، بيروب جاي، مانوشو جاي. مجلة علم وتقنيات السكري. ٢٠١٢; ١٦(٢):٣٢٨-٣٣٥. ٢. أرنسون آر غيبيني، أوزا كي، وآخرون. علاجات سريرية. ٢٠١٣; ٣٥: ٩٢٣-٩٢٣.

بيكتون ديكنسون الخاصة المحدودة، ٤ ريسيرش بارك درايف، نورث رايد نيوساوث ويلز ٢١١٣، أستراليا، الرقم المجاني: ١٨٠٠ ٦٥٦ ١٠٠



bd.com