

注射糖尿病药物

请按这些建议进行舒适有效的注射。^{1、5、#}

步骤 1: 混合药物 (对于 NPH 和胰岛素的混合) [^]



在两个手掌之间搓动注射笔, 然后至少将其轻轻翻转 20 次。

用肉眼检查笔芯底部是否还有结晶。

步骤 2. 将新针头安装在注射笔上*



务必将针头竖直拧上。

取下外帽, 然后取下彩色的内帽。

步骤 3. 对注射笔进行充注, 然后用刻度盘将剂量调大到所需剂量*



每次注射之前, 都要用刻度盘至少将剂量调整为两个单位, 并在针头竖直向上的情况下对注射笔进行充注。重复此步骤, 直到针尖上出现一滴药物为止, 以确保注射笔可以正常使用并且没有气泡。然后用刻度盘将剂量调大到所需剂量。

[^] 请务必遵循糖尿病药物制造商提供的使用说明。

* 此为一般建议。

注射糖尿病药物

步骤 4: 将针头刺入体内, 注射所需剂量并按住



将针头刺入注射部位, 然后将柱塞一直推至零位, 注入所需剂量。



为了确保所需剂量全部注入, 务必使针头保持在处于皮下的状态至少 10 秒。

步骤 5: 丢弃注射笔针头



每次注射后, 都要将针头取下并丢弃在锐器收集容器中。



每次注射都要使用新的注射笔针头

^ 请务必遵循糖尿病药物制造商提供的使用说明。此为一般建议。

关于针头长度的选择, 请咨询医疗保健专业人员:

推荐针头长度



BD Ultra-Fine™ 注射笔针头
4mm x 32G (0.23mm)
NDSS 产品代码: 101



BD Micro-Fine™ + 注射笔针头
5mm x 31G (0.25mm)
NDSS 产品代码: 97

使用 EasyFlow™ 技术的 BD Ultra-Fine™ 4mm 注射笔针头

- 5 斜面针尖可确保更轻微而舒适的注射体验^{2#}
- 对于手力较弱的使用者, 也可轻松、省时地完成注射^{3、5、#}
- 作为 BD 最小最细的注射笔针头, 适用于多数糖尿病患者^{1、5、#}

5 与标准 BD 薄壁注射笔针头相比。
与标准 BD 3 斜面注射笔针头相比。

参考文献:

1. Frid AH, Kreugel G, Grassi G et al. Mayo Clin Proc. September 2016;91(9):1231-1255. 2. Hirsch L, Gibney M, Berube J, Manocchio J. J Diabetes Sci Technol. 2012; 6(2): 328-335. 3. Aronson R, Gibney, Oza K. et al. Clin Ther. 2013; 35: 923-933.

地址: Becton Dickinson Pty Ltd, 4 Research Park Drive, North Ryde NSW 2113, Australia;
免费电话: 1800 656 100

bd.com

